



# NOS BACS À DÉCHETS INFECTIEUX

Sûrs et certifiés

Les **bacs à déchets infectieux** de 30, 50 et 60 litres sont principalement utilisés pour les **domaines médicaux** et **paramédicaux**. Ils sont destinés à collecter les **déchets de laboratoire**, les **poches de sang**, les **dérivés sanguins**, les **déchets anatomiques et pathologiques**, les **compresses** et **pansements** usagés ainsi que les **seringues**.

## ÉQUIPEMENTS



Les bacs à déchets infectieux sont certifiés ISO 23907 et sont équipés de couvercles à fermeture définitive offrant une sécurité optimale lors du transport.

Nous proposons deux types de bacs pour les déchets médicaux :

- les **bacs à couvercle standard** qui sont scellés définitivement dès la première fermeture ;
- les **bacs à couvercle circulaire** avec une ouverture réduite. Ils peuvent être ouverts ou fermés autant que nécessaire avant la fermeture définitive.

Les seringues, elles, doivent être jetées dans des bacs de 3 ou 5 litres qui seront ensuite déposés dans les bacs de 30, 50 ou 60 litres pour élimination.

## DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	30 litres	50 litres	60 litres
Longueur	404 mm	404 mm	404 mm
Profondeur	334 mm	334 mm	334 mm
Hauteur	315 mm	517 mm	646 mm
Poids à vide	1,05 kg	1,40 kg	1,65 kg

Lors de l'**enlèvement** de vos déchets médicaux ou paramédicaux, LAMESCH vous **échange** immédiatement le **bac repris** par un **bac neuf**.

## INSTRUCTIONS DE FERMETURE

### Couvercle standard



1 Presser doucement en diagonale sur les coins opposés.



2 Presser doucement sur les deux autres coins.



3 Presser sur les crochets sur la longueur du couvercle en commençant par ceux les plus proches de vous.



4 Presser sur les crochets sur la largeur du couvercle.

### Couvercle circulaire



1 Fermer le couvercle sur le bac en suivant les étapes « couvercle standard ».



2 Pour ouvrir, tourner l'obturateur de 45° vers la gauche.



3 Pour fermer temporairement, tourner l'obturateur de 45° vers la droite en passant le point de résistance.



4 Pour fermer définitivement le bac, placer l'obturateur sur la position fermeture temporaire puis tourner-le vers la droite, parallèle aux côtés longs du couvercle.